

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «КонваТек»
Шор О.А.
2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения

Пленка защитная КонваТек Силесс (ConvaTec Silesse) для ухода за кожей
(салфетки, спрей)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пленка защитная КонваТек Силесс (ConvaTec Silesse) для ухода за кожей (салфетки, спрей) предназначена для защиты кожи от агрессивного воздействия выделений организма (кишечного содержимого, ферментов, мочи) и повреждающего воздействия различных видов адгезивов.

Данная инструкция распространяется на формы выпуска спрей, салфетки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска - спрей:

Объем баллончика 50 мл

Форма выпуска - салфетки:

Кол-во в упаковке, шт. – 30

Размер салфетки, мм – 120x160

Номинальное содержание средства на 1 салфетку – 3г

СОСТАВ

Форма выпуска - спрей:

Гексаметилдисилоксан (Hexamethyldisiloxane 0.65cst CAS No 107-46-0)

Декаметилциклопента-силоксан/Триметилированная двуокись кремния
(Decamethylcyclopenta-siloxane / Trimethylated Silica CAS No 541-02-06/68988-56-7)

Форма выпуска - салфетки:

Гексаметилдисилоксан (Hexamethyldisiloxane 0.65cst CAS No 107-46-0)

Декаметилциклопента-силоксан/Триметилированная двуокись кремния
(Decamethylcyclopenta-siloxane / Trimethylated Silica CAS No 541-02-06/68988-56-7)

Вискоза/полиэстер

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделия.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Форма выпуска: спрей.

- ХОРОШО ВСТРЯХНИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- Очистите и аккуратно просушите кожу.
- При нанесении средства держите аэрозоль на расстоянии примерно 10 см от участка кожи, который необходимо обработать. Нанесите равномерный слой плавным движением.
- ConvaTec Silesse™ необходимо наносить каждый раз для надежной защиты кожи при смене средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием. Перед фиксацией (приклеиванием) вышеуказанных изделий убедитесь, что нанесенное на кожу средство Trio Silesse™ полностью высохло.
- ConvaTec Silesse™ рекомендуется наносить каждые 12-72 часа в зависимости от состояния кожи, если средство используется для защиты кожи без комбинации с адгезивными изделиями.
- Как правило, нет необходимости удалять средство. Однако средство ConvaTec Silesse™ можно легко удалить с помощью очистителя для кожи ConvaTec Niltac™.
- ConvaTec Silesse™ обеспечивает защиту кожи от агрессивного воздействия выделений организма (кишечного содержимого, ферментов, мочи и т.д.) и повреждающего действия различных видов адгезивов.
- Защитная пленка ConvaTec Silesse™ не препятствует надежной адгезии средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием. Не создает наслоений на поверхности кожи, которые могут препятствовать надежной фиксации (приклеиванию) средств по уходу за стомой, а также любых перевязочных средств с адгезивным покрытием.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте, следуя инструкции.
- Не используйте на нежных или чувствительных участках кожи (глаза, рот, уши, нос, влагалище)
- Протестируйте средство на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии раздражения.
- При возникновении раздражения прекратите использование средства.
- Избегайте непосредственного вдыхания средства.
- Не курите во время использования.

Форма выпуска: салфетки.

- Очистите и аккуратно просушите кожу.
- Надорвите пакетик и разверните салфетку.

- Осторожно протрите участок кожи, который необходимо защитить, и подождите несколько секунд до высыхания.
- Защитная пленка, образовавшаяся после использования салфеток ConvaTec Silesse™, помогает защитить кожу от агрессивного воздействия выделений организма (кишечного содержимого, ферментов, мочи и т.д.) и повреждающего действия различных видов адгезивов.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте, следуя инструкции.
- Не используйте на нежных или чувствительных участках кожи (глаза, рот, уши, нос, влагалище)
- Протестируйте очиститель на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.
- При возникновении раздражения прекратите использование средства.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Флакон находится под давлением. Защищайте от солнечных лучей и не подвергайте воздействию температур выше 50°C. Не протыкайте и не сжигайте флакон даже после использования. Не распыляйте вблизи открытого огня или какого-либо раскаленного материала. Храните в недоступном для детей и животных месте. Легко воспламеняется.

Срок хранения изделия: 4 года.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере э

www.goszdravnadzor.ru



Всего пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (с...)

3