



ConvaTec

www.convatec.com

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетки «КонваКеа» для удаления адгезива, салфетки «КонваКеа» защитные.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетки «КонваКеа» для удаления адгезива используются для удаления адгезивных веществ применяемых в пластинах кало и мочеприемников, пластырях и гидроколлоидных повязках. Салфетки «КонваКеа» защитные создают защитную пленку на коже при использовании средств ухода за стомой, адгезивов, пластырей и гидроколлоидных повязок.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

Салфетки «КонваКеа» для удаления адгезива

1. Осторожно приподнять край пластины кало или мочеприемника, пластырь, гидроколлоидную повязку.
2. Протирать салфеткой для удаления адгезива кожу под адгезивной поверхностью, постепенно отделяя адгезивную поверхность от кожи.
3. Промыть кожу мылом, промыть водой и высушить насухо.

Салфетки «КонваКеа» защитные

1. Очистить поверхность, промыть и тщательно просушить.
2. Нанести защитный слой с помощью салфетки «КонваКеа» на поверхности, требующей защиты и дать высохнуть. В случае контакта с поврежденной кожей возможно кратковременное жжение.
3. Наложить средство для ухода за стомой, адгезив, пластырь и т.д.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного использования. Избегать контакта с глазами. Не накладывать непосредственно на рану, ожоговую поверхность, стому. Накладывать только на кожу окружающую рану, стому, ожоговую поверхность.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

Не применять рядом с открытым огнем. Использовать только по согласно указаний по использованию. Хранить в недоступном для детей месте.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$ .

